


# Ny og forbedret klargøring af ProlacSan probiotisk gel (mælkesyrebakterier)


Enklere. Hurtigere. Bedre opblanding.

1

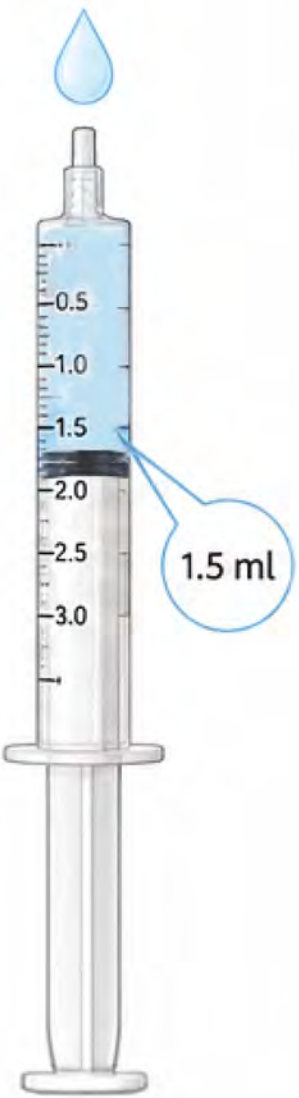

Optræk 1,5 ml demineraliseret vand i den tomme sprøjte.

2

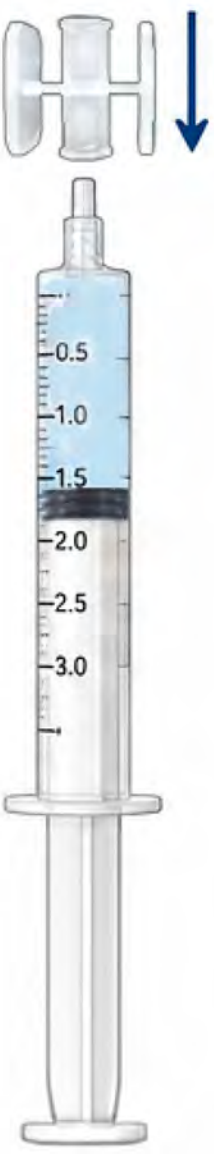


Montér Luer-lock-konnektor på sprøjten med vand.

3



Fjern hættten fra sprøjten med ProlacSan Gel-pulver, og skru de to sprøjter sammen.

4

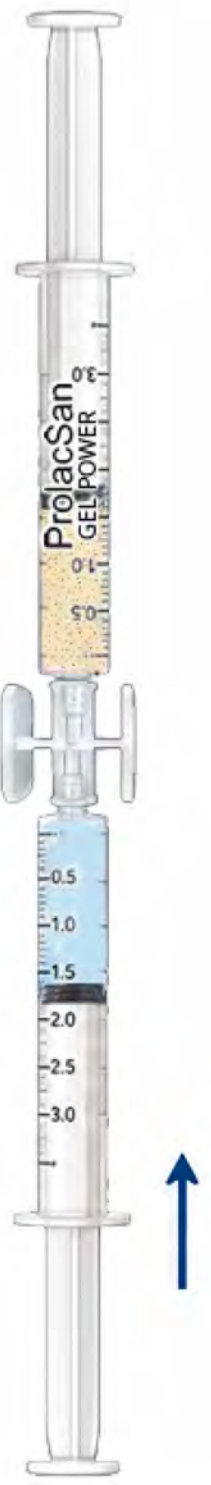

Påbegynd opblandingen ved at trykke stemplet i sprøjten med vand helt i bund, så væsken overføres til pulveret.

5



Opløs pulveret ved skiftevis at presse de to stempler frem og tilbage. Gentag denne proces 20 gange.

6



Lad de sammenkoblede sprøjter hvile i 15 minutter, så gelen dannes. Sprøjterne skal forblive sammenkoblet i hele hviletiden.

7



Tryk ét af stemplerne helt i bund, så al gelen overføres til den sprøjte, som applikationsspidsen skal monteres på. Fjern Luer-lock-konnektor, og monter applikationsspidsen på denne sprøjte. ProlacSan Gel er nu klar til brug.



## Hvorfor den nye metode?

- ✓ Enklere og mere intuitiv klargøring
- ✓ Mere homogen gelkonsistens
- ✓ Forbedret opblanding
- ✓ Reduceret risiko for ufuldstændig opløsning
- ✓ Mere pålidelig brugeroplevelse ved applikation



Bemærk: Formuleringen, mælkesyrebakteriestammer og det tilsigtede anvendelsesområde er uændrede.  
**Kun klargøringsmetoden er forbedret.**